

Effettuare un backup del database pazienti in RealGUIDE™ 5.0

Sommario

| | |
|---|---|
| Accedere ai comandi per il backup del database pazienti | 2 |
| Comandi disponibili per il backup | 3 |
| Posizione della cartella database pazienti | 4 |




3DIEMME S.r.l.
P.IVA 02938110133
www.3diemme.it
support@3diemme.it

Sede Legale:
Via Risorgimento,9
22063 Cantù – (CO)
Italia


Sede Operativa:
Via Delle Baraggette,10
22060 Figino Serenza – (CO)
Italia

Telefono:
+39 031 7073353

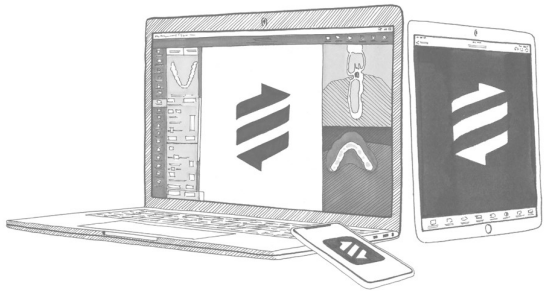


Accedere ai comandi per il backup del database pazienti

1. Eseguire il software
2. Cliccare su *Impostazioni*

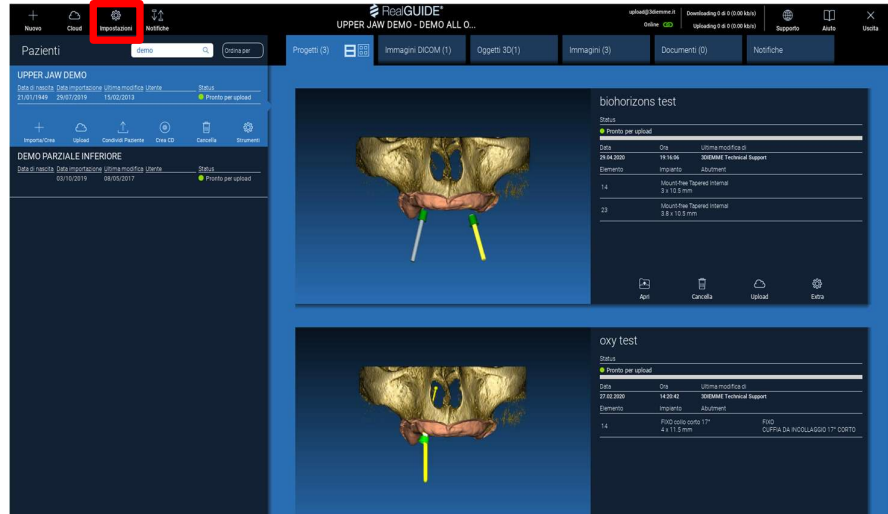

3. Cliccare su *Database* per accedere ai comandi disponibili

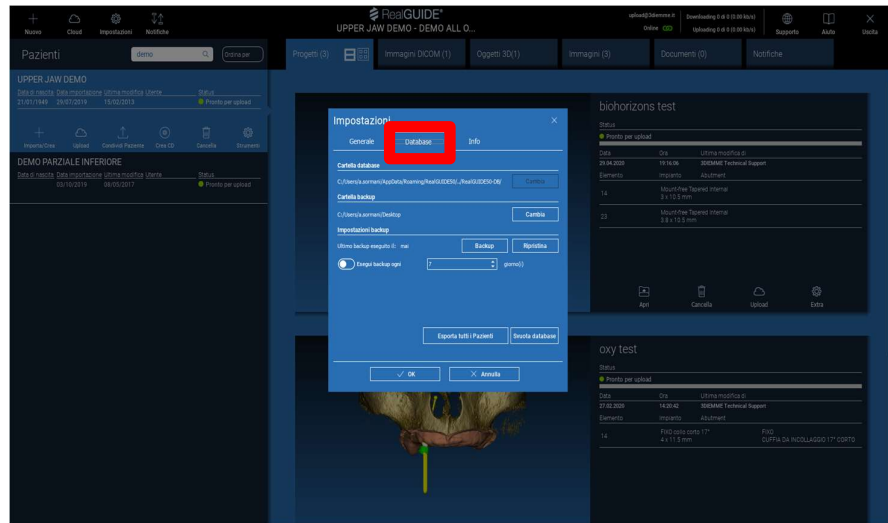


3DIEMME S.r.l.
P.IVA 02938110133
www.3diemme.it
support@3diemme.it

Sede Legale:
Via Risorgimento,9
22063 Cantù – (CO)
Italia


Sede Operativa:
Via Delle Baraggette,10
22060 Figino Serenza – (CO)
Italia


Telefono:
+39 031 7073353

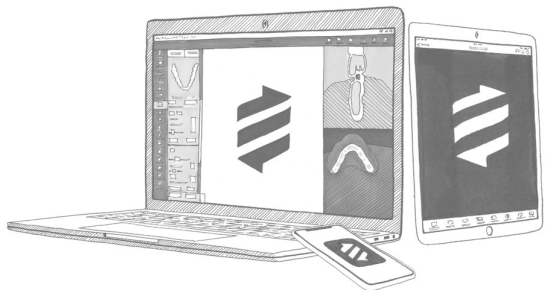

Comandi disponibili per il backup


- **Cartella database:** non è modificabile;
- **Cartella backup:** indica dove verrà salvata la cartella di backup del database pazienti (deve essere sempre una cartella sul PC locale, non un hard disk esterno o un archivio online);
- **Impostazioni backup:** è possibile impostare un backup automatico periodico, secondo le necessità, utilizzando il comando *Esegui backup ogni...*
ATTENZIONE! Tale opzione richiede di avere sempre a disposizione molto spazio, backup automatici non controllati possono saturare la memoria del computer;
- Cliccare sulla casella **Backup** per creare immediatamente un unico archivio ZIP contenente tutti i pazienti del database locale (anche quelli scaricati dal Cloud). Lo ZIP verrà creato nel folder indicato in *Cartella backup*. Il tempo di creazione del file ZIP dipende dal numero di pazienti e dalla grandezza dei file;
- **Ripristina:** permette di selezionare la cartella backup precedentemente creata e di importarne nuovamente il contenuto in RealGUIDE;
- **Esporta tutti i pazienti:** crea una cartella ZIP per ogni paziente contenuto nel database (esclusi quelli scaricati dal Cloud), salvandolo nella posizione specificata dall'utente. Per importare nuovamente questi casi, si dovrà procedere con la medesima procedura usata per importare un nuovo paziente. Si può importare una sola cartella ZIP-paziente alla volta;
- **Svuota database:** elimina completamente il database pazienti attuale (l'operazione non può essere annullata).

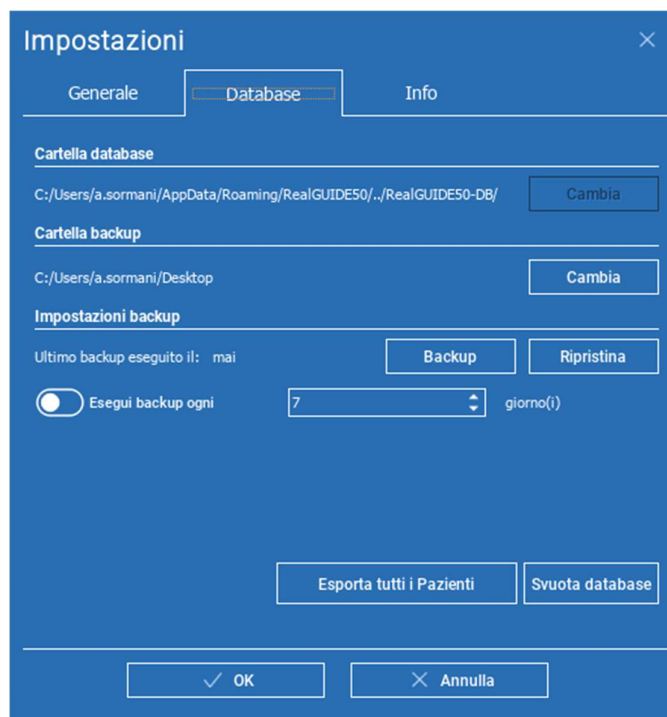

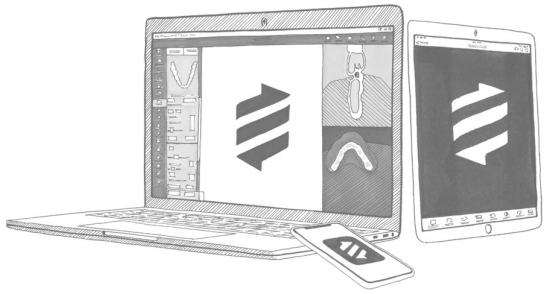


Posizione della cartella database pazienti

1. Eseguire il software
2. Cliccare su *Impostazioni*
3. Nella scheda *Generale* scegliere *Mostra cartella impostazioni*

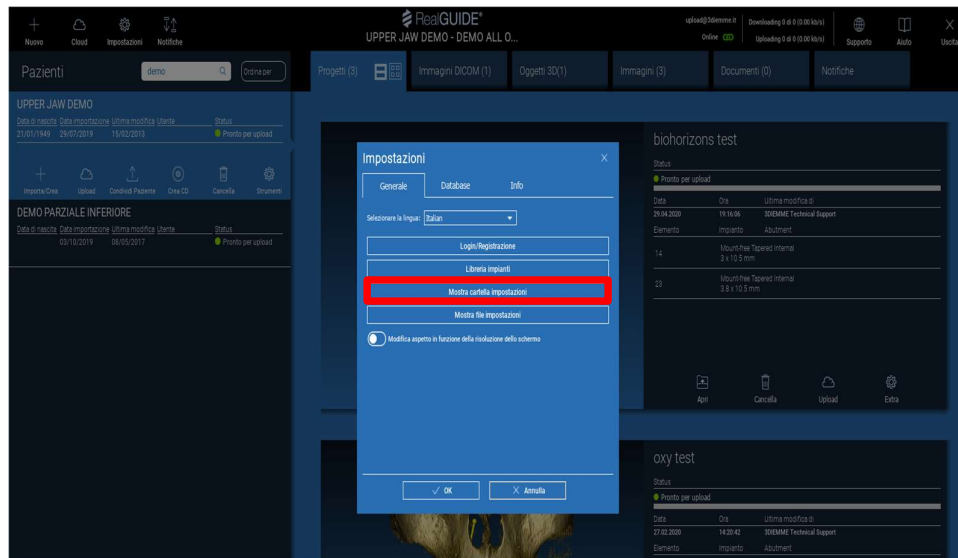

4. All'apertura della cartella delle impostazioni *RealGUIDE50*, uscire nella cartella immediatamente precedente *Roaming*

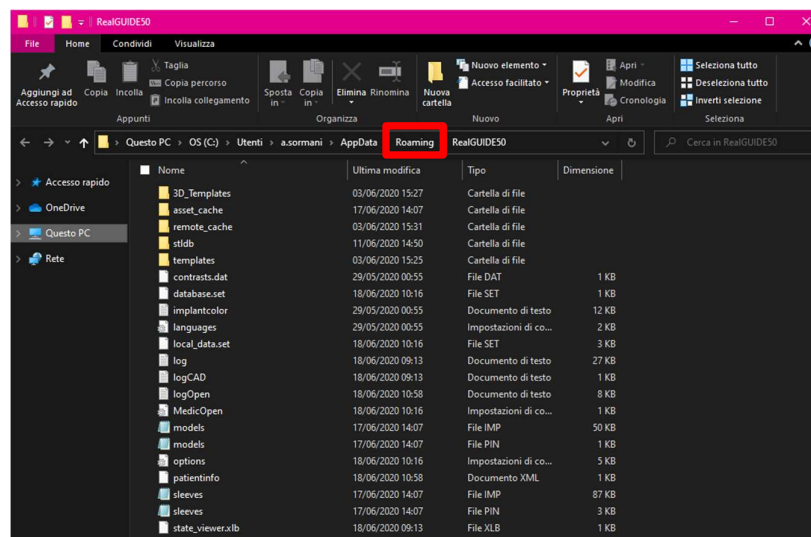


3DIEMME S.r.l.
 P.IVA 02938110133
www.3diemme.it
support@3diemme.it

Sede Legale:
 Via Risorgimento,9
 22063 Cantù – (CO)
 Italia

Sede Operativa:
 Via Delle Baraggette,10
 22060 Figino Serenza – (CO)
 Italia

Telefono:
 +39 031 7073353

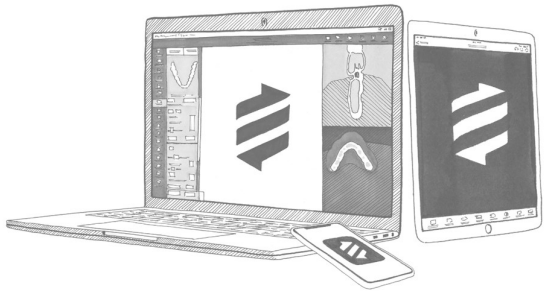

5. La cartella del database pazienti è *RealGUIDE50-DB*

